

Koupelnové sedátko model 5053



návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,

gratulujeme k nákupu vaší nové výškově nastavitelné koupelnové židle. Tato židle poskytuje větší bezpečnost a komfort v koupelně a velmi rychle a snadno se sestavuje. Je ideální do prostor, kde se běžná koupelnová židle nevejde.




- Umožňuje sedět ve sprše nebo koupelně
- Výška sedáku je nastavitelná v pěti stupních 35,5 - 53 cm
- Anti-bakteriální a hygienické sedadlo
- Otvory v sedátku odvádějí vodu a snižují nebezpečí uklouznutí
- Trvanlivý rám z eloxovaného hliníku
- Snadno se čistí
- Rozměry: 32,5 × 32,5 × 35,5 - 53 cm
- Rozměry sedátka: 32,5 × 35,5 cm (× 3 cm výška)
- Hmotnost: 1,25 kg
- Maximální zatížení: 120 kg
- Nohy s protiskluzovými nástavci
- Rychlá a snadná montáž

Bezpečnostní pokyny:

- Věnujte pozornost povolené maximální hmotnosti uživatele.
- V žádném případě neupravujte výrobek a nepřipevňujte k němu žádné další prvky.
- Nepoužívejte toto sedátko jako schůdky. Nepoužívejte je na ostatním nábytku nebo vybavení.
- Tento výrobek je určen jen pro soukromé účely a není vhodný pro použití např. v nemocnici nebo v domově důchodců.
- Toto sedátko lze použít pouze v místnostech nebo sprchových koutech se stabilní podlahou.
- Před každým použitím zkontrolujte, jestli je židle postavena stabilně, bezpečně a bez nebezpečí uklouznutí.
- Pravidelně kontrolujte stav sedátka. Utáhněte šrouby, pokud jsou uvolněné. Ujistěte se, že pryžové protiskluzové nástavce nohou nejsou prasklé, opotřebované, nebo zda zcela nechybí.

Montáž:

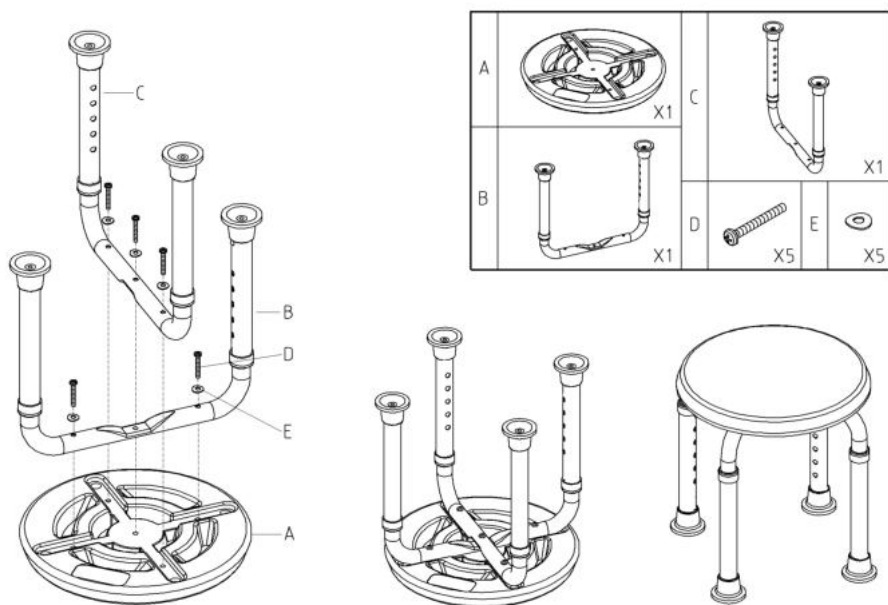

Opatrnost

- Sedátko lze používat pouze ve sprchách, které mají bezpečný a neklouzavý povrch.
- Zkontrolujte před každým použitím že je židle postavena stabilně, bezpečně a bez nebezpečí uklouznutí. Na sedátko nikdy nestoupejte.

Úklid a údržba

- Umyjte a osušte židli po každém použití. Odstraňte nečistoty vlhkým hadrem, v případě potřeby i neutrálním čističem, pak vysušte.
- Nepoužívejte agresivní chemické látky pro čištění, například kyseliny nebo zásady. To by vedlo k poškození materiálu židle.
- V případě znečištění infekčními materiály sedátka mohou být čištěna standardními lihovými dezinfekčními roztoky.

Pokyny k likvidaci

Nepotřebné nebo poškozené sedátko zlikvidujte ekologicky v tomu určeném zařízení (sběrna, ekodvory). Prosím řiďte se podle aktuálně platných předpisů!

ARTTEC s.r.o.
Rosická 358, CZ - 664 17 Tetčice
www.arttec.cz
info@arttec.cz

Sídlo firmy: tel.: +420 546 422 114, fax: +420 546 410 494

Reklamační oddělení: tel.: +420 546 434 586,
fax: +420 546 212 004, mob: +420 731 542 965, reklamace@arttec.cz